



NutriLock™ – kateterlåsningen med antimikrobiell effekt.

Användningsområden

NutriLock™ är indicerat för alla centrala venösa accesser som används för parenteral nutrition eller läkemedel. Den innehåller taurolidin som den enda aktiva ingrediensen. Med sin breda antimikrobiella aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier och svamp, förebygger den biofilmsformationen och kateterrelaterade blodinfektioner.

Vi rekommenderar NutriLock™ för alla centrala venkatetrar, PICC-lines och portar som används för parenteral nutrition.


Förpackningsstorlek

NutriLock™ finns tillgänglig som:

Engångsdos: 3 ml ampull (10 ampuller per förpackning)



Instillationsprotokoll

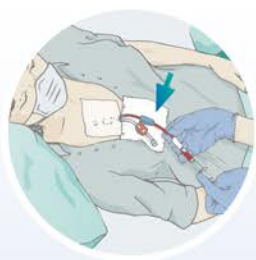

1

Innan behandling påbörjas, aspirera **NutriLock™** med en spruta från den centrala venösa accessen

Spola alla lumen i accessen med 10 ml natriumklorid genom att använda en spruta och tillämpa push-paus teknik.


Påbörja därefter behandling.



2

När du har avslutat behandling, spola accessen med 10 ml natriumklorid per lumen.


Knacka försiktigt på ampullens hals så att **NutriLock™** rinner ner från ampullens topp.

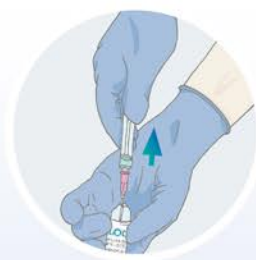

3

Placera ampullen i en position så du kan se den vita pricken på toppen och bryt av halsen med en snabb rörelse.

Dra upp den erforderliga volymen av **NutriLock™** från ampullen med en spruta, enligt fyllnadsvolymen för den centrala venösa accessen.

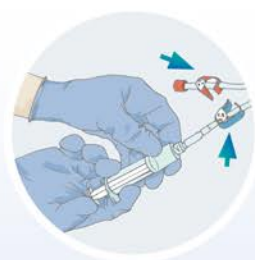

4

För en effektiv profylax mot infektioner, instillera långsamt en volym av **NutriLock™** som är tillräcklig för att fylla alla lumen helt i accessen. Överinstillera inte!

Fyllnadsvolymen för varje lumen anges på accessen eller kan erhållas från tillverkaren av produkten.

Distributör:

Transcutan

transcutan.com
info@transcutan.com
+46 (0)8-120 572 50

! Denna illustration ersätter inte tillverkarens bruksanvisning.

Mer information:
taurolock.com

