



**TauroLock™-HEP100** – kateterlåslösningen med antimikrobiell och antikoagulerande effekt.

## Användningsområden

TauroLock™-HEP100 har blivit godkänt för instillation i alla centrala venösa accesser. Denna låslösning förebygger biofilmsformationen och skyddar därmed patienter mot kateterrelaterade infektioner. Samtidigt säkerställer den öppenhet.

Vi rekommenderar TauroLock™-HEP100 för alla centrala venösa katetrar, PICC-lines och portar som används inom onkologi, hematologi och parenteral nutrition.

## Förpackningsstorlek

TauroLock™-HEP100 finns tillgänglig som:

**Engångsdos:** 3 ml ampull (10 ampuller per förpackning)



## Instillationsprotokoll



# 1

Innan behandling påbörjas, aspirera **TauroLock™-HEP100** från den centrala venösa accessen med en spruta.

Spola alla lumen i accessen med 10 ml natriumklorid genom att använda en spruta och tillämpa push-paus teknik.

Påbörja därefter behandling.



# 2

När du har avslutat behandling, spola accessen med 10 ml natriumklorid per lumen.

Knacka försiktigt på ampullens hals så att **TauroLock™-HEP100** rinner ner från ampullens topp.



# 3

Placera ampullen i en position så du kan se den vita pricken på toppen och bryt av halsen med en snabb rörelse.

Dra upp den erforderliga volymen av **TauroLock™-HEP100** från ampullen med en spruta, enligt fyllnadsvolymen för den centrala venösa accessen.



# 4

För en effektiv profylax mot infektioner och ocklusioner, instillera långsamt en volym av **TauroLock™-HEP100** som är tillräcklig för att fylla alla lumen helt i accessen. Överinstillera inte!

Fyllnadsvolymen för varje lumen anges på accessen eller kan erhållas från tillverkaren av produkten.

Distributör:

**Transcutan**

transcutan.com  
info@transcutan.com  
+46 (0)8-120 572 50

! Denna illustration ersätter inte tillverkarens bruksanvisning.

Mer information:  
[taurolock.com](http://taurolock.com)

