



TauroLock™-HEP500 – kateterlåslösningen med antimikrobiell och antikoagulerande effekt.

Användningsområden

TauroLock™-HEP500 är indicerat för patienter som använder en centralvenös access för hemodialys. Som en baktericid och fungicid låslösning, förebygger den biofilmsformationen och kateterrelaterade blodinfektioner. Tack vare sina antikoagulerande egenskaper, förblir patienter skyddade mot kateterokklusioner.

Förpackningsstorlek

TauroLock™-HEP500 finns tillgänglig i två storlekar:

Engångsdos: 5 ml ampuller (10 ampuller per förpackning)

Flergångsdos: 10 ml vialer (100 vialer per förpackning)



Instillationsprotokoll



1

Innan behandling påbörjas, aspirera **TauroLock™-HEP500** tillsammans med blod från den centrala venösa accessen med en spruta.

Spola alla lumen i accessen vardera med 10 ml natriumklorid genom att använda en spruta och tillämpa push-paus teknik.

Påbörja därefter behandling.



2

När du har avslutat behandling, spola accessen med 10 ml natriumklorid per lumen.

Knacka försiktigt på ampullens hals så att **TauroLock™-HEP500** rinner ner från ampullens topp.



3

Placera ampullen i en position så du kan se den vita prickningen på toppen och bryt av halsen med en snabb rörelse.

Dra upp den erforderliga volymen av **TauroLock™-HEP500** från ampullen med en spruta, enligt fyllnadsvolymen för den centrala venösa accessen.



4

För en effektiv profylax mot infektioner och ocklusioner, instillera långsamt en volym av **TauroLock™-HEP500** som är tillräcklig för att fylla alla lumen helt i accessen. Överinstillera inte!

Fyllnadsvolymen för varje lumen anges på accessen eller kan erhållas från tillverkaren av produkten.

Distributör:

Transcutan

transcutan.com
info@transcutan.com
+46 (0)8-120 572 50

! Denna illustration ersätter inte tillverkarens bruksanvisning.

Mer information:
taurolock.com

