



TauroLock™-U25.000 – kateterlåsningen med antimikrobiell, antikoagulerande och trombolytisk effekt.

Användningsområden

TauroLock™-U25.000 har blivit godkänd för instillation i alla centrala venösa accesser. Denna låsning förebygger biofilmsformationen i katetrar på ett tillförlitligt sätt: Därmed kan patienter undvika infektioner och bibehålla en hög öppenhet.

Vi rekommenderar TauroLock™-U25.000 för alla centrala venkatetrar, PICC-lines och portar.


Förpackningsstorlek

TauroLock™-U25.000 finns tillgänglig som:

Engångsdos: 5 ml vial (5 vialer med frystorkat pulver och 5 ml ampuller med TauroLock™ som lösningsmedel per förpackning)



Instillationsprotokoll

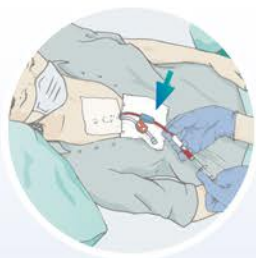

1

Innan behandling påbörjas, aspirera **TauroLock™-U25.000** tillsammans med blod från den centrala venösa accessen med en spruta. Spola alla lumen i accessen med 10 ml natriumklorid vardera genom att använda en spruta och tillämpa push-paus teknik.

Påbörja därefter behandling.



2

När du har avslutat behandling, spola accessen med 10 ml natriumklorid per lumen. Knacka försiktigt på ampullens hals så att **TauroLock™** rinner ner från ampullens topp.

Placera ampullen i en position så du kan se den vita pricken på toppen och bryt av halsen med en snabb rörelse.



3

Dra upp 5 ml **TauroLock™** från ampullen och använd det för att lösa upp urokinaset i vialen. Använd en kanyl som inte stansar ut partiklar från membranet.

Dra nu upp den klara lösningen av **TauroLock™-U25.000** från vialen genom att använda en lämplig spruta. Den färdigblandade lösningen måste användas direkt.



4

För en effektiv profylax mot infektioner och ocklusioner, instillera långsamt den erforderliga volymen av **TauroLock™-U25.000** för att fylla alla lumen helt i accessen. Överinstillera inte!

Fyllnadsvolymen för varje lumen anges på accessen eller kan erhållas från tillverkaren av produkten.

Distributör:

Transcutan

transcutan.com
info@transcutan.com
+46 (0)8-120 572 50

! Denna illustration ersätter inte tillverkarens bruksanvisning.

Mer information:
taurolock.com

