



**TauroLock™** – kateterlåslösningen med antimikrobiell och antikoagulerande effekt.

## Användningsområden

TauroLock™ har blivit godkänd för instillation i alla centrala venösa accesser. Som en baktericid och fungicid låslösning, förebygger den biofilmsformationen. Patienter förblir därmed skyddade mot kateterrelaterade infektioner och ocklusioner.

Vi rekommenderar TauroLock™ för alla centrala venösa katetrar, PICC-lines och portar.

## Förpackningsstorlek

TauroLock™ finns tillgänglig i tre storlekar:

**Engångsdos:** 3 ml eller 5 ml ampull (10 ampuller per förpackning)

**Flergångsdos:** 10 ml vialer (100 vialer per förpackning)



## Instillationsprotokoll



# 1

Innan behandling påbörjas, aspirera **TauroLock™** tillsammans med blod från den centrala venösa accessen med en spruta.

Spola alla lumen i accessen med 10 ml natriumklorid vardera genom att använda en spruta och tillämpa push-paus teknik.

Påbörja därefter behandling.



# 2

När du har avslutat behandling, spola accessen med 10 ml natriumklorid per lumen.


Knacka försiktigt på ampullens hals så att **TauroLock™** rinner ner från ampullens topp.



# 3

Placera ampullen i en position så du kan se den vita pricken på toppen och bryt av halsen med en snabb rörelse.

Dra upp den erforderliga volymen av **TauroLock™** från ampullen med en spruta, enligt fyllnadsvolymen för den centrala venösa accessen.

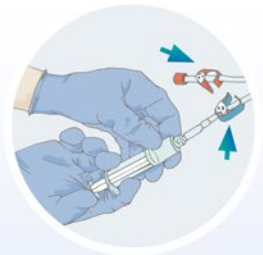

# 4

För en effektiv profylax mot infektioner och ocklusioner, instillera långsamt en volym av **TauroLock™** som är tillräcklig för att fylla alla lumen helt i accessen. Överinstillera inte!

Fyllnadsvolymen för varje lumen anges på accessen eller kan erhållas från tillverkaren av produkten.

Distributör:

**Transcutan**

transcutan.com  
info@transcutan.com  
+46 (0)8-120 572 50

! Denna illustration ersätter inte tillverkarens bruksanvisning.

Mer information:  
[taurolock.com](http://taurolock.com)

