

Företagsnamn	Artikelnummer	Artikelnamn	Material/Innehåll
Transcutan AB	TP-01-10	TauroLock™ 10V	Taurolidin (1,35 %) och citrat (4 %)



Levereras i förpackning med 100 vialer för flergångsbruk à 10 ml

Användningsområde

TauroLock™ är ett profylaktiskt kateterlås som finns i tre storlekar; TauroLock™ 3A (ampull à 3 ml, artikelnummer: TP-01-3), TauroLock™ 5A (ampull à 5 ml, artikelnummer: TP-01-5) samt TauroLock™ 10V (vial à 10 ml, artikelnummer: TP-01-10). Detta produktblad beskriver TauroLock™ 10V (vial à 10 ml, artikelnummer TP-01-10)

TauroLock™ 10V (TP-01-10) är godkänt för instillation i alla centrala venösa accesser av silikon eller polyuretan. TauroLock™ 10V är en baktericid och fungicid kateterlåslösning tack vare taurolidin som förhindrar bildandet av biofilm, vilket gör att patienter förblir skyddade mot kateterrelaterade infektioner. Taurolidin har en bred antimikrobiell aktivitet mot gram-

positiva och gram-negativa bakterier (ink. MRSA och VRE) samt svamp (t.ex. Candida). Taurolidin dödar >500 olika mikroorganismer. Citrat är antikoagulerande vilket skyddar patienter mot ocklusioner i katetern.

TauroLock™ rekommenderas för alla centrala venösa accesser där patienter behöver skyddas mot kateterrelaterade infektioner och ocklusioner exempelvis för patienter med parenteral nutrition, inom onkologi eller som ett alternativ till TauroLock™-HEP500 eller TauroLock™-U25.000 inom hemodialys (för patienter med heparininducerad trombocytopeni).

Användarinstruktioner

TauroLock™ 10V instilleras i det centrala venösa accesssystemet mellan behandlingssessioner. TauroLock™ 10V förblir i accessen till nästa behandling. TauroLock™ 10V är effektivt inom 2 timmar och kan ligga i katetern i 30 dygn. Observera att sjukvårdspersonal måste respektera fyllnadsvolymen för varje kateter eller portsystem.

TauroLock™ 10V ska aspireras innan nästa behandling.

TauroLock™ 10V är för flergångsbruk (vial med gummimembran) och är hållbar i 48 timmar efter första punktion.

Instruktionerna i detta produktblad ersätter inte bruksanvisningen.

Kontakta info@transcutan.com för personalutbildning på plats.