

Företagsnamn	Artikelnummer	Artikelnamn	Material/Innehåll
Transcutan AB	TP-02-5	TauroLock™ 5A Hep 500	Taurolidin, citrat (4 %) + heparin 500 IE/ml



Levereras i förpackning med 10 ampuller för engångsbruk à 5 ml

## Användningsområde

TauroLock™-HEP500 är ett profylaktiskt kateterlås som finns i två storlekar; TauroLock™ 5A Hep500 (ampull à 5 ml, artikelnummer: TP-02-5) och TauroLock™ 10V Hep500 (vial à 10 ml, artikelnummer: TP-02-10). Detta produktblad beskriver TauroLock™ 5A Hep500 (ampull à 5 ml, artikelnummer: TP-02-5).

TauroLock™ 5A Hep500 (TP-02-5) rekommenderas för centrala venösa accesser inom hemodialys. TauroLock™ 5A Hep500 är en baktericid och fungicid kateterlåslösning tack vare taurolidin som förhindrar bildandet av biofilm, vilket gör att patienter förblir skyddade mot kateterrelaterade infektioner. Taurolidin har en bred antimikrobiell aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier (ink.

MRSA och VRE) samt svamp (t.ex. Candida). Taurolidin dödar >500 olika mikroorganismer. Citrat och heparin är antikoagulerande vilket gör att katetern skyddas mot ocklusion och kan bibehålla en hög öppenhet.

## Användarinstruktioner

TauroLock™ 5A Hep500 instilleras i det centrala venösa accesssystemet mellan behandlingssessioner. TauroLock™ 5A Hep500 förblir i accessen till nästa behandling. TauroLock™ 5A Hep500 är effektivt inom 2 timmar och kan ligga i katetern i 30 dygn. Observera att sjukvårdspersonal måste respektera fyllnadsvolymen för varje kateter eller portsystem.

TauroLock™ 5A Hep500 ska aspireras innan nästa behandling.

TauroLock™ 5A Hep500 är för engångsbruk.

Instruktionerna i detta produktblad ersätter inte bruksanvisningen.

Kontakta [info@transcutan.com](mailto:info@transcutan.com) för personalutbildning på plats.