

| Företagsnamn | Artikelnummer | Artikelnamn | Material/Innehåll |
|---------------|---------------|-------------------------|---|
| Transcutan AB | TP-03-3 | TauroLock™ 3A Hep100 | Taurolidin, citrat (4 %) + heparin 100 IE/ml |



Levereras i förpackning med
10 ampuller för engångsbruk à 3 ml

Användningsområde

TauroLock™-HEP100 är ett profylaktiskt kateterlås som finns i en storlek; TauroLock™ 3A Hep100 (ampull à 3 ml, artikelnummer: TP-03-3).

TauroLock™ 3A Hep100 (TP-03-3) är godkänt för instillation i alla centrala venösa accesser av silikon eller polyuretan. TauroLock™ 3A är en baktericid och fungicid kateterlåslösning tack vare taurolidin som förhindrar bildandet av biofilm, vilket gör att patienter förblir skyddade mot kateterrelaterade infektioner. Taurolidin har en bred antimikrobiell aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier (inkl. MRSA och VRE) samt svamp (t.ex. Candida). Taurolidin dödar >500 olika mikroorganismer.

Citrat och heparin är antikoagulerande vilket skyddar patienter mot ocklusioner i katetern. TauroLock™ 3A Hep100 rekommenderas för centrala venösa accesser inom onkologi eller parenteral nutrition som kräver en effektivare antikoagulation än enbart citrat 4 % som finns i TauroLock™.

Användarinstruktioner

TauroLock™ 3A Hep100 instilleras i det centrala venösa accesssystemet mellan behandlingssessioner. TauroLock™ 3A Hep100 förblir i accessen till nästa behandling. TauroLock™ 3A Hep100 är effektivt inom 2 timmar och kan ligga i katetern i 30 dygn. Observera att sjukvårdspersonal måste respektera fyllnadsvolymen för varje kateter eller portsystem.

TauroLock™ 3A Hep100 ska aspireras innan nästa behandling.

TauroLock™ 3A Hep100 är för engångsbruk.

Instruktionerna i detta produktblad ersätter inte bruksanvisningen.

Kontakta info@transcutan.com för personalutbildning på plats.