

Företagsnamn	Artikelnummer	Artikelnamn	Material/Innehåll
Transcutan AB	TP-05	TauroLock™ 5A U25.000	Taurolidin (1,35 %) + citrat (4 %) + urokinase 25.000 IE



Användningsområde

TauroLock™-U25.000 är ett profylaktiskt kateterlås som finns i en storlek; TauroLock™ 5A U25.000 (TP-05). TauroLock™ 5A U25.000 levereras i par om 5 ampuller à 5 ml TauroLock™ (innehållande taurolidin 1,35 % + citrat 4 %) samt 5 injektionsflaskor med torrs substans (urokinase 25.000 IE). 5 ml TauroLock™ späds i injektionsflaskan med torrs substans.

TauroLock™ 5A U25.000 är en baktericid och fungicid kateterlåslösning tack vare taurolidin som förhindrar bildandet av biofilm, vilket gör att patienter förblir skyddade mot kateterrelaterade infektioner. Taurolidin har en bred antimikrobiell aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier (inkl. MRSA och VRE) samt svamp (t.ex. Candida).

Taurolidin dödar >500 olika mikroorganismer. Citrat är antikoagulerande och urokinase är trombolytiskt. TauroLock™ 5A U25.000 säkerställer ett starkt profylax mot ocklusion.

TauroLock™ 5A U25.000 är godkänd för användning i alla centrala venösa accesssystem av silikon eller polyuretan. Denna låslösning förebygger biofilmsformationen på ett tillförlitligt sätt och rekommenderas för de katetrar där öppenheten behöver säkerställas och som regelbunden användning inom hemodialys.

Användarinstruktioner

TauroLock™ 5A U25.000 används direkt efter tillredning och instilleras i det centrala venösa accesssystemet mellan behandlingssessioner. TauroLock™ 5A U25.000 förblir i accessen till nästa behandling. TauroLock™ 5A U25.000 är effektiv inom 2 timmar och kan ligga i katetern i 30 dygn. Observera att sjukvårdspersonal måste respektera fyllnadsvolymen för varje kateter eller portsystem.

TauroLock™ 5A U25.000 ska aspireras innan nästa behandling.

TauroLock™ 5A U25.000 är för engångsbruk.

Instruktionerna i detta produktblad ersätter inte bruksanvisningen.

Kontakta info@transcutan.com för personalutbildning på plats.