

Företagsnamn	Artikelnummer	Artikelnamn	Material/Innehåll
Transcutan AB	TP-07-3	NutriLock™ 3A	Taurolidin (2 %)



Levereras i förpackning med
10 ampuller à 3 ml

Användningsområde

NutriLock™ är ett profylaktiskt kateterlås som finns i en storlek; NutriLock™ 3A (ampull à 3 ml, artikelnummer: TP-07-3).

NutriLock™ 3A är godkänd för instillation i alla centrala venösa accesssystem men rekommenderas för centrala venösa accesser som inte utsätts för blodkontakt då lösningen inte innehåller någon antikoagulant, exempelvis vid parenteral nutrition eller där citrat behöver undvikas.

NutriLock™ 3A är en baktericid och fungicid kateterlåslösning tack vare taurolidin som förhindrar bildandet av biofilm, vilket gör att patienter förblir skyddade mot kateterrelaterade infektioner.

Taurolidin har en bred antimikrobiell aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier (ink. MRSA och VRE) samt svamp (t.ex. Candida). Taurolidin dödar >500 olika mikroorganismer.

Om patienters centrala venösa accesser utsätts för blodkontakt såsom vid blodprovstagningar eller blodtransfusioner rekommenderas istället ett kateterlås med antikoagulerande egenskaper också.

Användarinstruktioner

NutriLock™ 3A instilleras i det centrala venösa accesssystemet mellan behandlingssessioner. NutriLock™ 3A förblir i accessen till nästa behandling. NutriLock™ 3A är effektivt inom 2 timmar och kan ligga i katetern i 30 dygn. Observera att sjukvårdspersonal måste respektera fyllnadsvolymen för varje kateter eller portsystem.

NutriLock™ 3A ska aspireras innan nästa behandling.

NutriLock™ 3A är för engångsbruk.

Instruktionerna i detta produktblad ersätter inte bruksanvisningen.

Kontakta info@transcutan.com för personalutbildning på plats.